



# medi Power

Przeznaczenie produktu:  
Urządzenie do pedicure i zabiegów kosmetycznych

Dziękujemy za dokonanie zakupu.

W celu bezproblemowego działania przez wiele lat, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wskazówkami przed rozpoczęciem pracy oraz o zatrzymanie niniejszej instrukcji.

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami przed użyciem

## OPIS /GWARANCJA

' lat (\* Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego wykorzystania lub normalnego zużycia łożyska, tulei zaciskowej, silnika)

### USŁUGA ZA OPLATĄ

W przypadku awarii lub usterki spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem

Zastosowania niewłaściwego napięcia wejściowego (AC)

Upuszczenia podczas ustawiania lub przenoszenia

W przypadku niewłaściwego użycia

Wadliwego działania po naprawie w miejscach nie zalecanych przez producenta

## Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących wskazówek

Nie należy używać uszkodzonych lub wadliwych kabli zasilających, wtyczek i gniazd

Może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym.

Przy odłączeniu kabla zasilającego, należy przytrzymać wtyczkę, nie wolno dotykać jej mokrymi rękami.

Nie należy używać = nie należy zginać nadmiernie kabla zasilającego i nie należy naciskać go ciężkimi przedmiotami, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar.

Użyj przewodu uziemienia, pęknięcie lub wyciek elektryczny mogą spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub uziemienie, należy zwrócić się do elektryka lub do głównego biura.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych i świec lub papierosów, ponieważ może to spowodować pożar.

Produkt należy używać pod ścisłym nadzorem jeśli jest używany lub znajduje się w pobliżu osób bardzo młodych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych, nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym produkt został zainstalowany

i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia urządzenia odbierającego.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami

\* Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego są podłączone inne urządzenia.


- Konsultacja z serwisantem producenta lub lokalnym."

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

.. obr./min	WEJŚCIE	BEZPIECZNIK	WYJŚCIE	C/8		. HP	
				WYMIARY [MM]	WAGA	WYMIARY [MM]	WAGA
30.000 OBR. / MIN	AC 100-120V-5ty60Hz	B-7I75DVT5AL	400 W	W 245 0 265	47 kg	31,5 X 27,4	0,37kg
	AC 220-240V-50/60Hz	B-7I75DVT5AL	330 W	H 150		D 146	
Jeden na zewnątrz (w wlocie urządzenia), inne dla wewnątrz urządzenia							

## CZĘŚC. NAZWA

## USTAWIENIE I OBSŁUGA

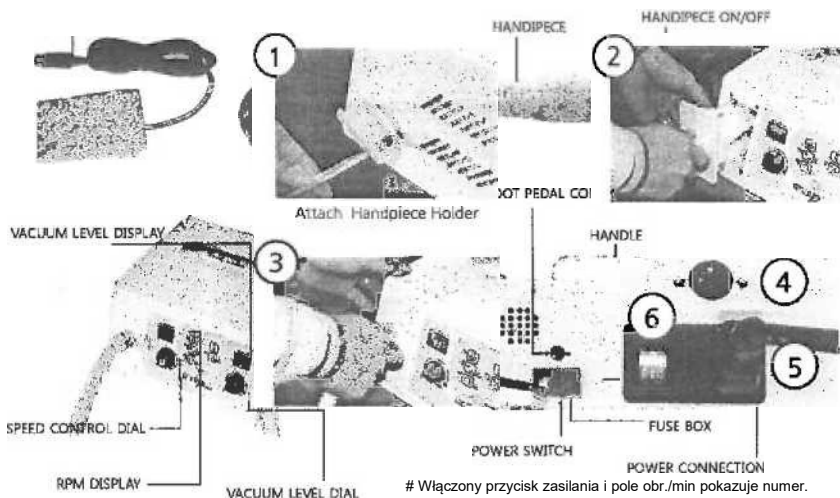

### ! CAUTIONS

- Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia pracy; 30t
- Aby uniknąć przegrzania, pozostaw miejsce co najmniej 30 cm od maszyny ze wszystkich stron
- W żadnym wypadku szczeliny wentylacyjne w urządzeniu nie mogą być zablokowane,
- Produkt należy przechowywać z dala od wilgoci.
- Urządzenia nie należy używać do usuwania cieczy.
- Produkt powinien być otwierany tylko przez wykwalifikowaną osobę upoważnioną przez producenta.
- Nieupoważnione otwarcie będzie prowadzić do utraty praw gwarancji.
- Nie należy używać benzyny lakowej lub chemicznych detergentów do czyszczenia obudowy. Jeśli jest to konieczne, należy użyć mokrego ręcznika (Odłącz wcześniej od źródła zasilania )

**OSTRZEŻENIE;** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, produkt należy podłączać wyłącznie do zasilania z uziemieniem ochronnym.

## PROCEDURA ZAMKNIĘCIA

- 1) Naciśnij przycisk zasilania z przodu.
- 2) Wyłącz wyłącznik zasilania z tyłu produktu


## WYMIANA WORKA NA KURZ



- 1) Odłącz uchwyt.
- 2) Wyciągnij worek na kurz.
- 3) Wymień na nowy.

Nigdy nie uruchamiamy silnika bez worka na kurz!

## INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA: UCHWYT ISL

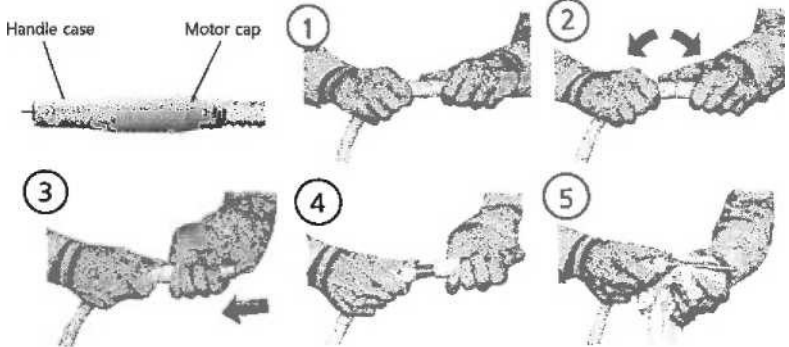

Wymyj wiertło i zdejmij obudowę uchwytu obracając ją.  
Zdejmij obudowę silnika obracając ją.

Wyczyść każdą część suchą ściereczką, lub pędzlem. Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności do demontażu.

» »s	Temperatura (-A E) (°C)	10-30
	Wilgotność względna (do ■ %) )	30-75
	Ciśnienie atmosferyczne (hPa)	700-1060
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura (°	20-60
	Wilgotność względna (%)	10-90
	Ciśnienie atmosferyczne (hPa)	500-1060

## SRESHIN

SAESHIN PRECISION CO., LTD.  
52, Secheon-ro 1-gil, Dasa, PWE, Dalseang-gun,  
Daegu, Korea  
Tel, 82-53-537-33411 faks, 82-53-580-0399

SOM-00585-E Rev. 0

[www.saeshin.com](http://www.saeshin.com) / traus'

'" ] Przedstawiciel UE  
Dongbang Acuprime  
1 Forrest Units, Hennock Road East  
Marsh barton, Exeter EX2 SRU.UK Tel. 44-1392-  
829500 Fax. 44-1392-823231 <http://www.acuprime.com>